

Hinweise zur Reinigung und Pflege von Edelstahl-Tischplatten



Die MarMed Tischplatten bestehen aus rostfreiem Edelstahl und sind somit beständig gegen alle handelsüblichen Desinfektionsmittel. Edelstahl zeichnet sich durch Langlebigkeit, Korrosions- und Säurebeständigkeit, sowie Abriebfestigkeit aus.

So reinigen Sie Ihre Tischplatte richtig:

- 1. Reinigen Sie die Platte täglich nach dem Gebrauch und der anschließenden Desinfektion mit destilliertem oder voll entsalztem Wasser**
- 2. Trocknen Sie die Platte sorgfältig ab**
- 3. Legen Sie (falls vorhanden) die Abdeckmatte erst wieder auf, wenn beide Flächen ebenfalls vollkommen abgetrocknet sind, oder erst am nächsten Morgen**

Leichte Verschmutzungen:

Leichte Verschmutzungen sowie fett- und ölhaltige Verschmutzungen lassen sich mit Edelstahlpflegespray leicht entfernen (MarMed Artikel-Nr. A000040).

Starke Verschmutzungen und Rostspuren:

Sollten sich am Edelstahl dennoch Rostspuren zeigen, so handelt es sich hierbei um sogenannten Flugrost, d. h. Rost, der durch Umwelteinflüsse auf die Edelstahloberfläche gelangt ist.

Das von MarMed verwendete Material selbst kann bedingt durch seine Eigenschaften bzw. seine Legierungsbestandteile nicht rosten!

Reinigen Sie ihre Tischplatte bei starker Verschmutzung mit handelsüblichen CHLORFREIEN Scheuermitteln. Besonders hartnäckige Verschmutzungen oder Rostspuren können mit einem Kunststoff-Vlies entfernt werden, anschließend ist die Tischplatte wie zuvor beschrieben zu Reinigen. Geeignetes Kunststoff-Vlies können Sie über MarMed beziehen.

Reinigung der Tischplatte mit dem Kunststoff-Vlies:

Führen Sie das trockene Vlies mit leichtem Druck in Längsrichtung über die Tischplatte bis alle Verschmutzungen entfernt sind.

Falls sich das Aussehen der polierten Stelle von der restlichen Tischplatte unterscheidet kann es sinnvoll sein, die komplette Platte leicht mit dem Vlies in Längsrichtung zu bearbeiten.

Um das Auftreten weiterer Rostspuren zu Vermeiden muss der Grund für die Rostbildung gefunden sowie der Pflegefehler behoben werden.

Mögliche Gründe für Rostbildung auf Edelstahl-Tischplatten:

1. Eisenhaltiges Wasser wurde zur Reinigung verwendet
2. Die Abdeckmatte wurde nach der Reinigung auf die noch feuchte Tischplatte gelegt
3. Verwendung von nicht rostfreien Instrumenten
4. Jod- oder Chlorrückstände

Noch Fragen?

MarMed GmbH
Auf der Kupferschmiede 1
D-35091 Cölbe

Tel.: 0049 - (0) 64 21 - 1 65 33 – 0
Fax: 0049 - (0) 64 21 - 1 65 33 – 7
Email: info@marmed.de