

## Betriebsanleitung MarMed Scherenhubtisch SHT-210



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem MarMed OP- und Behandlungstisch haben Sie ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt aus deutscher Produktion erworben.

Wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und möchten Ihnen mit dieser Anleitung eine schnelle und übersichtliche Einführung in die Bedienung und Pflege Ihres neuen Tisches geben. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um sich mit allen Funktionen Ihres neuen Tisches vertraut zu machen.

## Verwendete Symbole:

---



Mit diesem Symbol sind Warnhinweise gekennzeichnet

(1)

Eine Zahl in Klammern (1) ist ein Verweis auf ein mit einer eingekreisten Nummer gekennzeichnetes Bedienelement in dem dazugehörigen Bild

①



## 1. Produktbeschreibung

---

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

---

Das Gerät dient als OP- und Behandlungstisch für Kleintiere bis max. 100 kg Gewicht bei gleichmäßig verteilter Last.

Bei dem Modell auf Rollen darf der Transport von Tieren nur im abgesenkten Zustand erfolgen.

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Tisches diese Bedienungsanleitung und machen Sie sich mit allen Bedienelementen und Abläufen vertraut, bevor Sie den Tisch das erste Mal benutzen.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Tisches die Sicherheitshinweise im Kapitel 3.3.

### 1.2 Lieferumfang

---

1 Scherentisch, optionales Zubehör soweit bestellt und im Lieferschein verzeichnet

1 Bedienungsanleitung

1 Pflegeanleitung Edelstahl

1 Kunststoff Poliervlies

Weiteres Zubehör wie PVC-Auflagen, integrierte Waage, Zureichtische usw. finden Sie im aktuellen MarMed Katalog, sowie im Internet-Shop unter: [www.marmed.de](http://www.marmed.de)

### 1.3 Technische Daten

---

Höhenverstellung:	pumphydraulisch
Einstellbereich Tischhöhe:	29 bis 106 cm
Größe der Edelstahlplatte:	130 x 60 cm
Maximale Hubkraft bei gleichmäßig verteilter Last	bis 100 kg
Gewicht Komplettgerät (ohne Verpackung)	ca. 70 kg

---

Änderungen der technischen Daten und der Geräte-Ausführung sind ohne Vorankündigung vorbehalten

## 2. Inbetriebnahme

Der Scherenhubtisch muss gerade und wackelfrei aufgestellt werden.

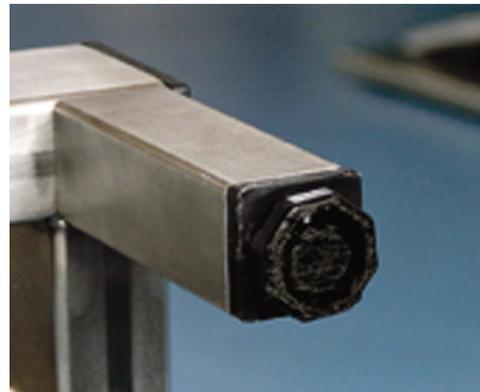
- Bei der Version auf Rollen müssen diese fixiert werden.
- Bei dem Modell mit Beinen müssen Unebenheiten mit Hilfe der Verstellfüße ausgeglichen werden.

### 2.1 Wackelfreie Aufstellung

---

An der Unterseite des Tisches sind bei dem **SHT 210B** an allen vier Ecken höhenverstellbare Kunststoffgleiter angebracht. Diese dienen dazu den Tisch gerade und wackelfrei aufzustellen.


Durch Herausdrehen eines oder mehrerer Füße können Bodenunebenheiten bzw. Gefälle von bis zu 12 mm ausgeglichen werden



### 2.2 Heben und Senken der Tischplatte

---

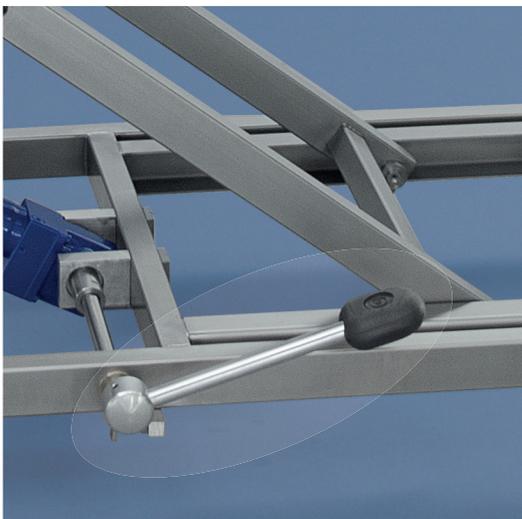Die pumphydraulischen Tische werden betriebsbereit ausgeliefert.



Mit dem Pumphebel kann die Höhe der Tischplatte eingestellt werden:

Treten Sie den Pumphebel so oft nach unten, bis die gewünschte Tischhöhe erreicht ist.

Schieben Sie den Pumphebel mit dem Fuß nach oben, um die Tischplatte abwärts zu bewegen.

## 3. Sicherheitshinweise

### 3.1 Aufstellort

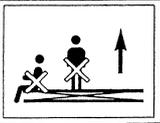
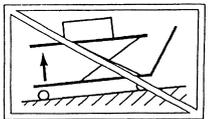
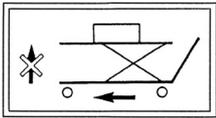
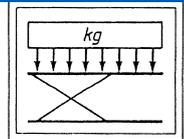
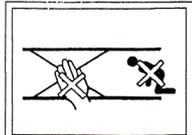
Der Tisch muss standsicher aufgestellt werden (siehe Kapitel 2: Inbetriebnahme).

Da bei einer unsachgemäßen Bedienung die Gefahr von Quetschungen der Gliedmaßen besteht, ist der Tisch für die Allgemeinheit und insbesondere für Kinder unzugänglich aufzustellen.

Die Bedienung darf ausschließlich durch befugtes Personal erfolgen. Dabei sind die Sicherheitshinweise im Kapitel 3.2 zu befolgen.

### 3.2 Bedienung und Einweisung

Das Bedienpersonal muss in den ordnungsgemäßen Umgang mit dem Scherenhubtisch eingewiesen werden. Erklären Sie in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der am Tisch angebrachten Warningschilder. Diese bedeuten im Einzelnen:

	<p>Das Betreten, Befördern, Heben von Personen ist verboten!</p>
	<p>Auf schiefen Ebenen ist das Heben und Senken von Lasten verboten!</p>
	<p>Fahren mit gehobener Last ist verboten. Die Rollen müssen fixiert sein.</p>
	<p>Die maximale Traglast von 100 kg darf nicht überschritten werden. Die Last muss gleichmäßig verteilt werden.</p>
	<p>Vor Aufenthalt / Reingreifen sicher stellen, dass der Fußschalter nicht versehentlich aktiviert werden kann!</p>



# 4. Instandhaltung

## 4.1 Reinigung und Pflege der Edelstahlteile

---

Die Tischplatte besteht aus rostfreiem Edelstahl und ist somit beständig gegen alle handelsüblichen Desinfektionsmittel.

### Tipps für die richtige Pflege Ihrer Tischplatte:

1. Reinigen Sie Platte und Abdeckmatte (falls vorhanden) nach dem täglichen Gebrauch und / oder Desinfektion mit destilliertem oder voll entsalztem Wasser.
2. Trocknen Sie Platte und die Matte (falls vorhanden) gründlich ab.
3. Legen Sie die Abdeckmatte (falls vorhanden) erst wieder auf, wenn Tischplatte und Abdeckmatte vollkommen abgetrocknet sind.

Edelstahl zeichnet sich durch Langlebigkeit, Korrosions- und Säurebeständigkeit und hohe Abriebfestigkeit aus. Sollten sich am Edelstahl dennoch Rostspuren zeigen, so handelt es sich hierbei um sogenannten Flugrost, d. h. Rost, der durch Umwelteinflüsse auf die Edelstahloberflächen gelangt ist. Flugrost, sowie fett- und ölhaltige Verschmutzungen lassen sich mit Edelstahlpflegespray leicht entfernen (MarMed Artikel-Nr. A000040). Besonders hartnäckige Verschmutzungen bzw. Flugrost entfernen Sie am besten mit dem beiliegenden Kunststoff-Poliervlies.

## 4.2 Reinigung und Pflege der Gleitrollen

---

Die Gleitrollen sind wartungsfrei. Die Rollen, sowie die Führungsschienen müssen frei von groben Verschmutzungen sein, da sonst der Hebe-, bzw. Absenkungsvorgang schwergängig wird oder ins Stocken kommen kann.

## 4.3 Zubehör- und Ersatzteile

---

### Ersatzteile:

Ersatzteile für Ihren Scherenhubtisch können Sie direkt über MarMed beziehen.  
Bitte sprechen Sie uns an!

### Zubehör:

Zubehör wie z. B. PVC-Auflagen, Normschienen, Klemmkloben, Zureichtische usw. finden Sie im aktuellen MarMed Katalog und in unserem Internet-Shop unter [www.marmed.de](http://www.marmed.de)

## 4.4 Regelmäßige Prüfungen

---

Führung und Antrieb der pumphydraulischen Höhenverstellung sind wartungsfrei.

Es muss eine jährliche Prüfung durchgeführt und dokumentiert werden.

- Verwenden Sie für die Prüfung die Liste auf der letzten Seite
- Kopieren Sie die Liste
- Haken Sie jeden Punkt ab, wenn er in Ordnung ist
- Nehmen Sie das Gerät erst wieder in Betrieb, wenn alle Punkte abgehakt sind
- Heften Sie die Liste nach Abschluss der Prüfung hinter den Anhang der Betriebsanleitung

## 4.5 Störungssuche und -beseitigung

---

Art der Störung	Möglicher Grund	Abhilfe
Hubtisch hebt nicht	Gerät ist überlastet	Last vermindern
Hubtisch hebt nicht	Hindernis im Bereich der Laufrollen	Hindernis beseitigen
Hubtisch senkt nicht vollständig ab	Hindernis im Bereich der Laufrollen	Hindernis beseitigen



## Prüfliste

Datum:

Gerätetyp: SH210B

SH210R

Seriennummer:

Feststeller der Räder sind funktionstüchtig: ja  nein

Führungsschienen für Gleitrollen sind sauber? ja  nein

Gefahraufkleber ist vorhanden und lesbar? ja  nein

Schweißkonstruktion ist ohne Beschädigung? ja  nein

---

Ort, Prüfer, Unterschrift



## **Noch Fragen?**

---

MarMed GmbH  
Auf der Kupferschmiede 1  
D-35091 Cölbe

Tel.: 0049 - (0) 64 21 - 1 65 33 – 0  
Fax: 0049 - (0) 64 21 - 1 65 33 – 7  
Email: [info@marmed.de](mailto:info@marmed.de)  
Internet: [www.marmed.de](http://www.marmed.de)