

Hängen Sie dieses Blatt in ihren Sterilisiererraum

Richtiger Einsatz des Spezialöls für Handstücke



hier Öl ein-
sprühen



Sprühkopf-Adapter



1

Sprühen

Sprühen Sie das MK-dent Spray unter Einsatz des geeigneten Adapters in die Anschlusskuppelungen, bzw. in das Loch. Sprühen Sie ca. 2 Sekunden

Zählen Sie dabei 1..... 2.....



**Einmal wöchentlich muss die Bohrer-
aufnahmespindel geölt werden**

2

5 bis 10 Sekunden laufen lassen

Damit das überschüssige Öl ablaufen kann, lassen Sie die Handstücke laufen. Dies kann an der Bedieneinheit im Behandlungsraum, oder am Reinigungsplatz im Sterilisiererraum erfolgen.

Zählen Sie dabei 1..... 2 3..... 4..... 5.....



3

Überflüssiges Öl mit Alkohol entfernen

Wischen Sie die Außenseite des Handstücks mit Hilfe eines mit reinem Alkohol leicht befeuchtetem Tuch. Benutzen Sie reinen Alkohol, vielen freiverkäuflichen Wischtüchern werden neben Alkohol noch andere Zusatzstoffe beigesetzt. Diese können Flecken auf der Außenseite, und schlimmere Schäden im Inneren der Handstücke verursachen.



4

Eintüten und autoklavieren

Sterilisieren Sie die Handstücke nach den Anweisungen des Herstellers. Stellen Sie sicher, dass der Trocknungsvorgang im Sterilisiergerät komplett durchlaufen wird. Wir empfehlen Sterilisierbeutel, die auf der einen Seite aus Papier, auf der anderen Seite aus Folie bestehen.



5

Abkühlen lassen

Entnehmen Sie die Handstücke aus dem Sterilisiergerät und lassen Sie sie auf Raumtemperatur abkühlen. Wenn Sie die Handstücke im erhitzten Zustand betreiben, wird die Lebensdauer der Turbine stark eingeschränkt. Vor dem Einsatz ist erneutes einölen nicht notwendig.



Warnhinweis! Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Handstücke...

.....nie mit Flächendesinfektionsmittel einsprühen oder abwischen

.....nie in Wasser eintauchen oder einweichen

.....nie im Ultraschall-Reinigungsgerät säubern