

D003010: Anleitung HDO Pro Bluetooth Verbindung unter Windows 11

1. Software und Treiber laut beiliegender Anleitung installieren
2. Bluetooth Dongle (USB-Stick) einstecken und Installation abwarten
3. Windows Einstellungen öffnen, dann auf „Geräte“ klicken
4. Auf der Seite „Bluetooth und andere Geräte“ die Option „Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen“ wählen
5. Als Art des Gerätes „Bluetooth“ auswählen und Suche abwarten. Ggf. alle Bluetooth Geräte anzeigen auswählen
6. Das HDO-Gerät sollte als HDO-XXXX (Vierstellige Nummer) angezeigt werden
7. Das HDO-Gerät koppeln
8. Die HDO-Software öffnen
WICHTIG: Die erste Verbindung muss per USB-Kabel mit dem PC hergestellt werden
9. Im Menü Einstellungen, dann COM, dann Bluetooth auswählen
10. Im Menü eine freie Schnittstelle wählen (COM 1, COM 2 oder ähnlich)
11. Das USB-Kabel entfernen. Das Symbol sollte jetzt das Bluetooth Logo zeigen und blau sein, falls nicht eine andere COM-Schnittstelle wählen
12. Wenn das Gerät einmal eingerichtet ist, kann die Bluetooth Verbindung über das Monitor Programm aktiviert werden
13. Sollte das nicht der Fall sein, in den Windows Einstellungen die Kopplung prüfen (Siehe Schritt 3 bis 7)