

## Betriebswasserentkeimung

Stand: 22.12.2016

**Flüssigkonzentrat zur kontinuierlichen Aufrechterhaltung der Wasserqualität in Betriebswasserwegen (einschließlich Instrumente und Becherfüller) ärztlicher und zahnärztlicher Behandlungseinheiten.**

- *Konzentrat, das 1%ig oder gebrauchsfertig zur Desinfektion angewendet wird*
- *Beugt der Neubesiedelung mit Keimen vor*
- *Beseitigt und verhindert Algenbildung*
- *Verhindert Kalkausfällungen und Ablagerungen*
- *Nicht korrosiv*

### Zusammensetzung

Phenoxyethanol, PHMB (Biguanid), EDTA, Na-Tosylchloramid

### Wirkungsspektrum

- *Bakterizid \**
- *Levurozid \**

### Anwendungskonzentrationen

1%ig oder als Konzentrat zur Stoßdesinfektion/Sanierung

### Gutachten

- Institut Fresenius, Stockach, desinfizierende Wirksamkeit 1995-10/ 1996-08
- Institut Heppeler, Lörrach, phys. + ökolog. Verträglichkeit, 1997-10
- Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, Zytotoxizitätsprüfung 2012-11

*In besonderen Fällen können Sie Gutachten sowie Freigaben gerne bei uns anfordern.*

### Anwendungsgebiet

Alpron ist ein Konzentrat zur kontinuierlichen Entkeimung des Betriebswassers und der wasserführenden Leitungen (Instrumentenschläuche und Becherfüller) in allen zahnärztlichen Behandlungseinheiten.

\* im Konzentrat



Alpron



Alpron StarterSet

CE 0123

### Haltbarkeit

2 Jahre

### Umwelt

Die Gebrauchslösung ist physiologisch und ökologisch unbedenklich.

### Materialverträglichkeit

Sehr materialschonend

### Dosieranleitung

Anwendung bei interner Desinfektionsanlage:  
Dosierbehälter mit unverdünntem Alpron auffüllen und vom Servicetechniker auf herstellereinspezifische Zudosierung einstellen lassen.

Anwendung bei externer Dosiervorrichtung:  
Externes Betriebswasser (z. B. Bottle Care System) mit Alpron 1%ig verdünnen (Verhältnis: 10 ml Alpron pro 990 ml Betriebswasser) und an die Behandlungseinheit anschließen. Bei Dosierbeistellgeräten Einstellung durch den technischen Kundendienst vornehmen lassen.

**Anwendung nur durch Fachpersonal mit entsprechender Schutzkleidung.**

### Freigaben

Werksfreigabe u. a. von Sirona Dental

### Lieferformen

REF 3177-N Alpron StarterSet  
REF 3184 4 x 1 Ltr. Alpron