

Betriebswasserentkeimung

Stand: 21.07.2015

Zur Entkeimung und Verhinderung der Bildung von Biofilm in Betriebswasserwegen von ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungseinheiten

- Beseitigt sicher und zuverlässig sowohl organische als auch anorganische Rückstände wie z. B. Kalk
- Wirkt gegen ein breites Keimspektrum
- Verhindert eine schnelle Neubildung von Biofilm
- Nicht korrosiv
- Gebrauchsfertig
- Keine Dauerzudosierung

Zusammensetzung

Ethylendiamintetraacetat,
p-Hydroxybenzoesäureester,
Polyhexamethylenbiguanid,
enthält Phenylalanin

Wirkungsspektrum

- *Bakterizid*
- *Fungizid*

Gutachten

- Institut Niedermann, Überlingen, Screening Test Bakterizidie, Fungizidie, 2014-05
- Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, Zytotoxizitätsprüfung, 2012-12

Diese Gutachten können Sie gerne bei uns anfordern.

Anwendungsgebiet

- Gebrauchsfertige Desinfektionslösung zum 1 -2maligen wöchentlichen Einsatz z. B. im Weekend-System II, BCS, sowie anderer autarker medizinischer Wasserversorgungssysteme. Bilpron dient zur Desinfektion und Verhinderung der Bildung von Biofilm in den wasserführenden Leitungen (einschl. Instrumentenschläuchen und Mundglasfüller) in allen ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungseinheiten.
- Beseitigt sicher und zuverlässig sowohl organische als auch anorganische Rückstände wie z. B. Kalk.



CE 0123

- Wirkt gegen ein breites Keimspektrum.
- Verhindert die Neubildung von Biofilm.
- Nicht korrosiv
- Gebrauchsfertig
- Keine Dauerzudosierung
- Verweildauer in der Einheit: bis zum nächsten Arbeitstag bzw. bis zu 3 Monaten möglich, jedoch min. 12 Std.

Anwendung nur durch Fachpersonal mit entsprechender Schutzkleidung.

Haltbarkeit

2 Jahre

Dosieranleitung

Vor Beginn der Anwendung (Wochenende, Urlaub oder über Nacht) den Vorratsbehälter (Tank) bis zur Markierung mit Bilpron (z. B. mit Hilfe des Bilpron-Messbechers) füllen. Übertragungsinstrumente von den Instrumentenschläuchen entfernen. Entkeimungssystem gem. Bedienungsanleitung aktivieren. Jeden Betriebswasserweg (alle Instrumentenschläuche, Mundglasfüller und andere Wasserversorgungswege z. B. Peripheriegeräte) mit Bilpron fluten, bis es (deutlich sichtbar an der Blaufärbung) an den jeweiligen Auslässen austritt. Danach Behandlungseinheit ausschalten.

Betriebswasserentkeimung

Stand: 21.07.2015

Bilpron verbleibt bis zur Wiederaufnahme der Praxistätigkeit, jedoch mindestens 12 Std. in den Betriebswasserleitungen.

Bei Wiederinbetriebnahme der Behandlungseinheit das Entkeimungssystem deaktivieren (ausschalten) und alle gefluteten Betriebswasserwege so lange spülen, bis klares Wasser austritt. Nähere Instruktionen siehe Bedienungsanleitung des Entkeimungssystems.



Bilpron StarterSet

Freigaben

Werksfreigaben u a. von Sirona Dental, Takara Belmont, TGA, Planmeca, Ritter, heka dental, Chirana-Dental

Lieferformen

REF 3181 6 x 1 Ltr. Flasche im Karton

REF 3179-N Bilpron StarterSet

REF 3179-PM Bilpron StarterSet 3 (PM)

Zubehör

REF 3081 Messbecher (500 ml)



Bilpron StarterSet 3 (PM)