



NOBAMED Paul Danz AG

NOBADENT®

REF 149408

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt NOBADENT® ist eine weiße, weiche, chlorfrei gebleichte Zahnwatterolle, der **Größe 0,8 cm x 4 cm**. NOBADENT® wird bei der Zahnbehandlung im Dentalbereich eingesetzt und dient zur Aufnahme von Speichel, Sekret und Blut. Die Zahnwatterolle besitzt ein hohes Absorptionsvermögen und hat eine Polster- und Abhaltefunktion.

Zusammensetzung

Baumwolle

Hinweis

Die unsterile Watterolle muss vor ihrer Verwendung auf offenen Wunden mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden. Das Produkt kann mit Feuchter Hitze bei 121°C/134°C, 2 bis 3 bar, nach DIN EN 17665, Strahlen nach DIN EN ISO 11137 oder Ethylenoxid nach DIN EN ISO 11135 sterilisiert werden.

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Watte gemäß BP oder USP *absorbent cotton*

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe