




Vasco[®] OP eco

Herausragende Passform und hohe Qualität
zu einem günstigen Preis

Vasco® OP eco

Anatomisch geformte OP-Handschuhe –
herausragende Passform und hohe Qualität zu einem günstigen Preis

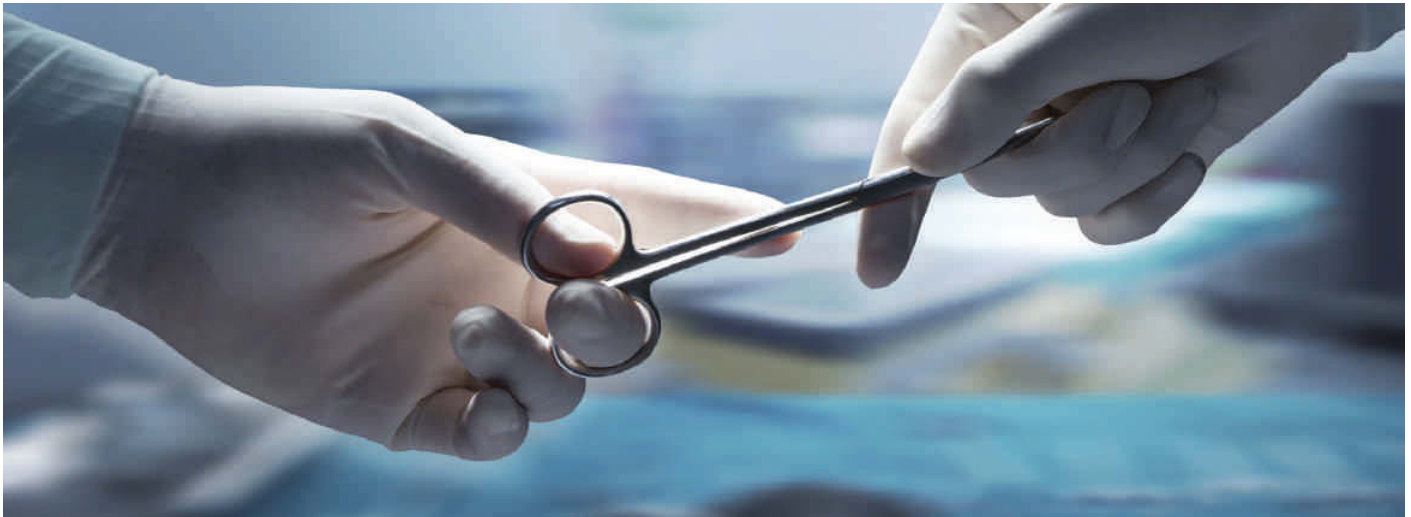

Weiche und hochflexible ergonomische Latexhandschuhe – die ideale Wahl für mehr Sensibilität und Sicherheit | AQL 1.0
Nahezu frei von chemischen Zusatzstoffen, frei von Thiuramen und Mercaptobenzothiazol (MBT)

- Schutzhandschuhe nach PSA 89/686/EEC, EN 420, EN 374
- Puderfrei
- Innenseite mit latexfreier Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
- Sicherer Halt durch mikrorauhe Oberfläche
- 0,19 mm durchschnittliche Wandstärke (Handinnenseite) bietet zuverlässigen Schutz
- Größenadaptierte Handschuhlängen von 260 mm bis 280 mm

Vasco® OP eco

Größe	Verkaufseinheit	Art.-Nr.
5,5	40 Paar	6081308
6	40 Paar	6081316
6,5	40 Paar	6081324
7	40 Paar	6081332
7,5	40 Paar	6081340
8	40 Paar	6081359
8,5	40 Paar	6081367
9	40 Paar	6081375



Alle Vasco® OP-
Handschuhe sind
paarweise als
Rechts/Links-Paar im
Papierumschlag und
einem Peel-Beutel
verpackt.

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-45 05 | www.bbraun.de


Leitfaden zum An- und Ausziehen von sterilen Operations- und Schutzhandschuhen

Der Leitfaden zeigt eine mögliche Variante des An- und Ausziehens.


INDIKATIONEN

- Vor operativen Eingriffen und invasiven pflegerischen Maßnahmen¹
- Wenn Sterilität beim Umgang mit Medizinprodukten oder anderen Materialien gefordert ist


ANZIEHANLEITUNG²

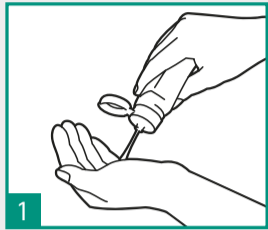


1 Führen Sie vor dem Anlegen von sterilen Handschuhen eine hygienische Händedesinfektion durch.

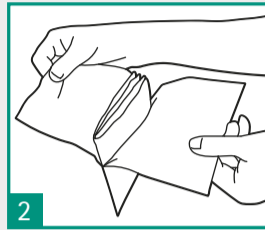


2 Prüfen Sie die Verpackung auf Unversehrtheit. Öffnen Sie die unsterile Umverpackung komplett, so dass die sterile Innenverpackung auf einer sauberen und desinfizierten Arbeitsfläche ohne Berührung abgelegt werden kann.

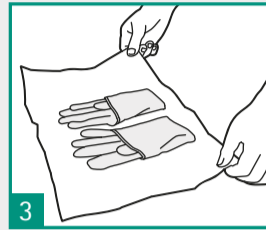


3 Öffnen Sie die Verpackung, indem Sie sie vorsichtig an den Ecken anfassen und ausbreiten.

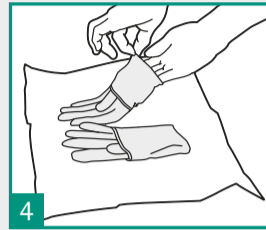


4 Nehmen Sie den ersten Handschuh mit Daumen und Zeigefinger an der umgeschlagenen Stulpe auf.

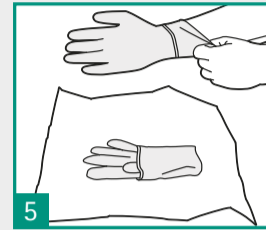


5 Ziehen Sie den Handschuh in einer Bewegung über die andere Hand bis zum Handgelenk hoch.

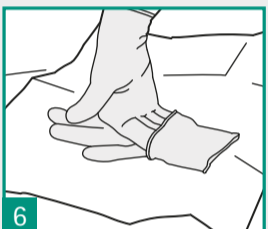


6 Nehmen Sie den zweiten Handschuh auf, indem Sie die Finger der behandschuhten Hand in die umgeschlagene Stulpe schieben.

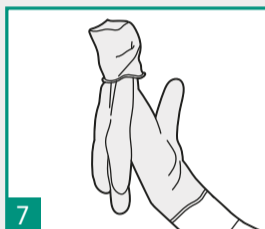


7 Ziehen Sie in einer einzigen Bewegung den zweiten Handschuh an und vermeiden Sie dabei jegliche Berührung der Haut mit den sterilen Außenflächen.

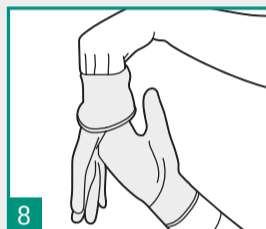


8 Wenn notwendig passen Sie die Finger inkl. Zwischenräumen an, bis die Handschuhe richtig sitzen.

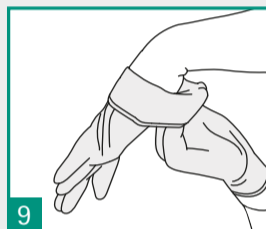


9 Führen Sie die Finger der fertig behandschuhten Hand in die noch eingeschlagene Stulpe der anderen Hand und entfalten Sie diese vorsichtig.

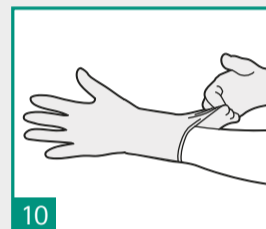


10 Die behandschuhten Hände dürfen ausschließlich sterile Medizinprodukte und Flächen sowie den zuvor desinfizierten Hautbereich berühren.

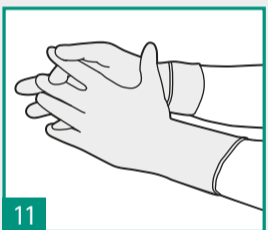


11 Führen Sie die Finger der fertig behandschuhten Hand in die noch eingeschlagene Stulpe der anderen Hand und entfalten Sie diese vorsichtig.

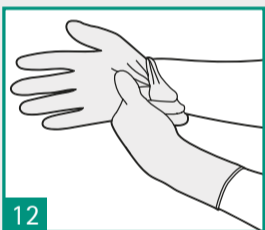

12 Die behandschuhten Hände dürfen ausschließlich sterile Medizinprodukte und Flächen sowie den zuvor desinfizierten Hautbereich berühren.

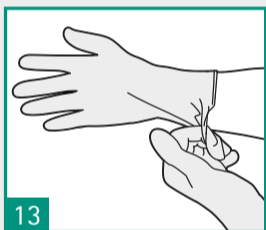


13 Entfernen Sie den ersten Handschuh, indem Sie ihn mit den Fingern der anderen Hand abziehen. Ziehen Sie den Handschuh aus, indem Sie ihn von innen nach außen, bis zu den zweiten Fingergelenken rollen (nicht vollständig ausziehen).

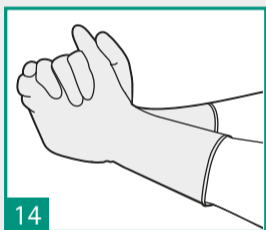


14 Ziehen Sie den Handschuh aus, indem Sie ihn von innen nach außen kehren. Achten Sie darauf, dass die ungeschützte Haut ausschließlich mit der Innenseite des Handschuhs in Berührung kommt.


AUSZIEHANLEITUNG²

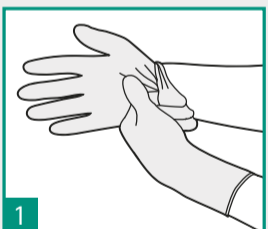


1 Entfernen Sie den ersten Handschuh, indem Sie ihn mit den Fingern der anderen Hand abziehen. Ziehen Sie den Handschuh aus, indem Sie ihn von innen nach außen, bis zu den zweiten Fingergelenken rollen (nicht vollständig ausziehen).

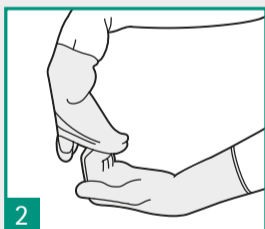


2 Halten Sie die Stulpe der halb abgezogenen Handschuhs mit der anderen Hand fest. Entfernen Sie den anderen Handschuh, indem Sie mit den Fingern der teilweise noch behandschuhten Hand in die Stulpe greifen.

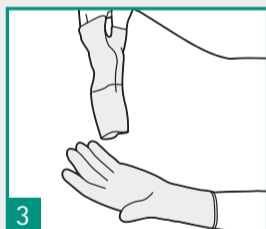


3 Ziehen Sie den Handschuh aus, indem Sie ihn von innen nach außen kehren. Achten Sie darauf, dass die ungeschützte Haut ausschließlich mit der Innenseite des Handschuhs in Berührung kommt.

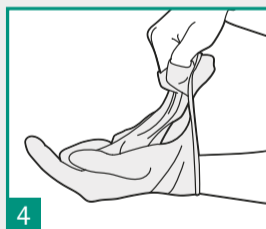


4 Entsorgen Sie das dabei entstandene Handschuhbällchen (Innenseite der Handschuhe ist jetzt außen) direkt in ein bereitstehendes Abfallbehältnis.

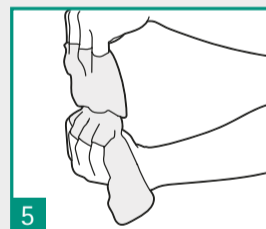

5 Abschließend führen Sie eine hygienische Händedesinfektion durch.

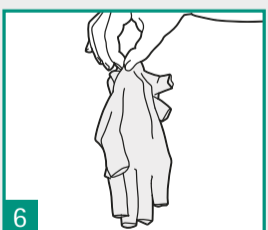

6 Entsorgen Sie das dabei entstandene Handschuhbällchen (Innenseite der Handschuhe ist jetzt außen) direkt in ein bereitstehendes Abfallbehältnis.

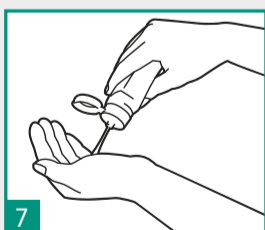

7 Abschließend führen Sie eine hygienische Händedesinfektion durch.

HINWEISE/EMPFEHLUNGEN

- Bei chirurgischen Eingriffen mit erhöhtem Perforationsrisiko und/oder chirurgischen Eingriffen an Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko wird für das OP-Team das Tragen von zwei Paar übereinander gezogenen OP-Handschuhen (sog. double gloving) möglichst mit Indikatorsystem empfohlen¹
- Bei Operationen von Patienten mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer Latexallergie (insbesondere Spina bifida, urogenitale Fehlbildungen und Ösophagusatresie) sollen naturlatexfreie OP-Handschuhe getragen werden¹

Quellen
¹ KRINKO-Empfehlung: "Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens", Pkt. 6.1 "Medizinische Einmalhandschuhe und Schutzhandschuhe", RKI (Hrsg.)
² World Health Organization, WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, 2009, ISBN 978-92-4-159790-6