

B-Autoklav Premium+ 23 L



Der B-Autoklav Premium+ 23 L ist ein Autoklav von höchster Qualität, der alle Anforderungen für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal erfüllt. Wie andere Autoklaven verfügt auch dieses moderne und leistungsstarke Modell über einen Drucker für Sterilisationsberichte. Bei der Premium-Serie haben Sie die Möglichkeit, den Bericht auf einer SD-Karte zu speichern. Das Trocknen der Instrumente erfolgt mit einem hochwertigen Ventilator.

Darüber hinaus verfügt der B-Autoklav Premium+ 23 L über einen Etikettendrucker, mit dem Sie auf einfache Weise Etiketten für die Beutel im Autoklaven drucken können. Dies macht ihn zu einem idealen Gerät für Zahnärzte und andere medizinische Fachkräfte. Dieser Premium-Autoklav ist dank seines Touchscreens und des übersichtlichen Menüs sehr einfach zu bedienen. Darin können Sie genau sehen, wo Sie sich im Sterilisationsprozess befinden.

Sterilisieren und Testen mit dem B-Autoklav Premium+ 23 L

Für den B-Autoklav Premium+ 23 L stehen verschiedene Sterilisations- und Prüfprogramme zur Verfügung. Mit diesen Programmen können Sie sowohl verpackte und unverpackte Instrumente als auch Textilien sterilisieren. Je nach gewähltem Programm beträgt die Sterilisationszeit bis zu 50 Minuten, so dass Sie innerhalb einer Stunde hygienische, sterilisierte Instrumente erhalten.

Die Testprogramme des Premium+ 23 L bestehen aus einem Helixtest, einem Vakuumtest und einem B&D-Test. Mit seinen fünf Tablettis in zwei verschiedenen Größen ist er ideal für die Sterilisation verschiedenster Instrumente.

Spezifikationen:

Außenmaße (L x B x H)	60 x 50 x 43 cm
Garantie	2 Jahre
Eingebauter Label Drucker	ja
Kesselgröße	Ø 25 cm x 45 cm
Vakuumpumpe	GD-Thomas
Anschluss-Leistung	1950 W
Eingebauter Etikettendrucker	ja
Nettogewicht	53 KG
Prozessregistrierung	SD und Thermodrucker
Ausführliches Handbuch	Deutsch, Englisch und Niederländisch
Inhalt	23 Liter
Sterilisationstemperatur	121°C, 134°C
Stromversorgung	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Testprogramme	B&D/Helix-Test, Vakuumtest
Tabletts	4 St. 34x21x1 cm, 1 St. 34x17x1 cm
Sterilisationszeit	40 bis 50 Minuten, abhängig vom Programm